

SKU: DMDR-TM88

7 DROGAS EN SALIVA

TEST DE LAPIZ MAS ALCOHOL



✍ El **Test de Drogas en Saliva Formato Lápiz II New** es un dispositivo rápido, higiénico y fácil de usar, **el mas usado del mercado**, ideal para controles laborales, transporte, minería, faenas y programas de prevención.


Su diseño tipo **lápiz** permite una **toma de muestra directa y segura**, reduciendo riesgos de contaminación y evitando manipulación del evaluado.

Características: Obtén resultados rápidos y confiables en solo **3 a 10 minutos** con el **Test de Drogas en Saliva de 7 Drogas + Alcohol**, su lectura es 100% visual, clara y sin necesidad de equipos adicionales, ideal para controles rápidos.

Tecnología **inmunoensayo cromatográfico** con anticuerpos monoclonales específicos para cada droga. Detecta consumo reciente desde los **5-10 minutos posteriores** al uso, con ventanas de detección entre 24 y 72 horas según la sustancia.

No existe un “valor de corte” oficial para test de saliva homologado por el ISP de Chile.

NOMBRE DE DROGA	Sigla	Punto de Corte Copa ng/ml	T° detección mínima	T° detección máxima
COCAINA	COC	20	5-10 min.	24 horas
MARIHUANA	THC	50	4 horas	14 horas
ANFETAMINAS	AMP	50	5-10 min.	72 horas
BENZODIAZEPINAS	BZO	10	2 horas	72 horas
OPIÁCEOS	OPI	40	1 hora	7-21 Horas
METANFETAMINAS	MET	50	5-10 min.	72 horas
KETAMINA	KET	50	4 horas	24 horas
ALCOHOL	ALC	0,02%	30 min.	24 horas

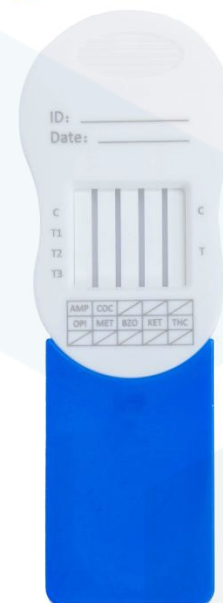

Consideracion: La detección de drogas puede variar significativamente **entre personas**, ya que intervienen factores como el **tiempo transcurrido desde el consumo**, la **dosis**, el **metabolismo individual**, la **combinación con otras sustancias** y la **vía de administración**.

Debido a esta variabilidad, no es posible **definir con exactitud una ventana de detección para cada individuo**. Las tablas de referencia sirven únicamente como una guía general, ya que los resultados pueden diferir ampliamente de una persona a otra.

✍ **El ISP de Chile**, indica que los resultados de saliva, aunque puedan ser útiles en contextos privados o preventivos **no tienen respaldo normativo como tamizaje oficial**.

Si una empresa usa test de saliva, debe tener en claro que los resultados serían **preliminares / no regulados**.



SKU: DMDR-TM88


TEST DE LAPIZ II: 7 DROGAS EN SALIVA MAS ALCOHOL

Instrucciones de uso:

1. Llevar la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Sacar el test en Saliva **Lapiz** de su bolsa y utilizarlo.
2. Abrir la tapa del **dispositivo**.
3. Recoger la muestra **de fluido oral** de la siguiente manera. Importante: coloque la **lengua contra la mandíbula superior e inferior** y las encías para generar el fluido oral. Inserte el extremo de la esponja en la boca, frote activamente alrededor de las encías en ambos lados de la **boca (10-15 veces)** para ayudar a la saturación. Coloque la mecha absorbente debajo de la lengua para recolectar líquido oral hasta que aparezca el flujo en las ventanas de prueba (aproximadamente **60 segundos**)
4. Situar el Prueba de sobre una superficie **plana y limpia**.
5. El resultado debe ser interpretado de **3 a 10 minutos**. No interpretar el resultado pasado 10 minutos.



Pasos de uso.....!

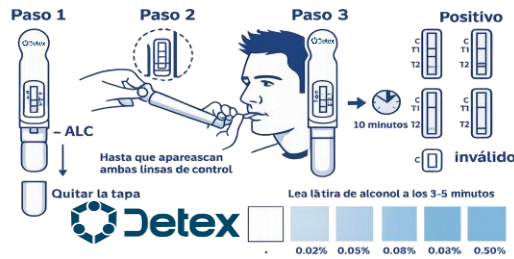

Sacar la tapa del panel y recoger la muestra de fluido oral.

Interpretación de Resultados: Test de Droga en Saliva

Los test de inmunoensayo funcionan con líneas de color que aparecen en las zonas **C (Control)** y **T (Test)**. La lectura debe realizarse dentro del tiempo indicado en el envase (5 minutos).

1. Resultado NEGATIVO (-)

Se observa una línea en **"C"** y una línea en **"T"**, aunque sea tenue.

- ✓ Detecta que la droga no está presente o está por debajo del valor de corte (cut-off).
- ✓ Una línea tenue en **"T"** sigue siendo NEGATIVA.

Interpretación: No se detecta consumo reciente significativo según los estándares del ISP.

2. Resultado POSITIVO (+)

Aparece línea en **"C"**, pero NO aparece línea en **"T"**.

- X La ausencia de la línea **"T"** indica que la droga está igual o por encima del cut-off.
- X Debe considerarse un resultado presuntivo positivo.

Interpretación: La sustancia está presente en niveles relevantes para tamizaje laboral o clínico.

Recomendación ISP: Todo resultado positivo debe confirmarse **con una técnica de laboratorio (GC/MS o LC/MS/MS)**.

3. Resultado INVÁLIDO

No aparece línea en **"C"**, independientemente de lo que ocurra en **"T"**.

- X El test no funcionó correctamente.
- X Puede deberse a volumen insuficiente de muestra, humedad, contaminación o producto dañado.

Acción: Repetir con un nuevo dispositivo.