

SKU: L11-DOA07F1

# 6 DROGAS + ALCOHOL EN ORINA

## TEST DE COPA



El Test Rápido de Detección de **6 Drogas + Alcohol** en Orina en **Copa Simple y Termómetro** es un **dispositivo confiable, seguro y de lectura fácil**, diseñado para evaluaciones rápidas y eficientes que **cumple con el tamizaje recomendado por el ISP de Chile**.

**Características:** Incluye **copa recolectora estéril, panel multianalito y termómetro** incorporado que verifica la temperatura de la muestra para evitar adulteraciones.

Permitir que el test, muestra de orina y/o control alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar el test.

El resultado de la tira de droga debe leerse a los **5 minutos**. No interpretar el resultado después de 10 minutos.



### Puntos de Cortes del dispositivo y comparados con el Tamizaje Recomendado del ISP de Chile.

NOMBRE DE DROGA	Sigla	Punto de Corte Copa ng/ml	Tamizaje ISP ng/ml	Cumple Tamizaje
COCAINA	COC	150	150	✓ Cumple
MARIHUANA	THC	50	50	✓ Cumple
ANFETAMINAS	AMP	500	500	✓ Cumple
BENZODIAZEPINAS	BZO	200	200	✓ Cumple
OPIÁCEOS	OPI	2.000	2.000	✓ Cumple
METANFETAMINAS	MET	500	500	✓ Cumple
ALCOHOL	ALC	0,002	-	-

Fuente: tamizaje de drogas de abuso en orina Version2, 2024 del ISP de Chile.



El **ISP de Chile o Instituto de Salud Pública de Chile** establece **CUT-OFF** (puntos de corte) obligatorios para considerar una prueba de tamizaje como válida.

Estos valores provienen de estándares internacionales **SAMHSA y EWDTs**.

**El Alcohol No es requerido por ISP**, pero válido como tamizaje adicional.

👉 **Este test cumple 100% con todos los valores de corte oficiales del ISP de Chile.**

SKU: L11-DOA07F1

## TEST DE COPA: 6 DROGAS + ALCOHOL EN ORINA

### Instrucciones de uso:

1. Llevar la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Sacar el test en **frasco de su bolsa** y utilizarlo.
2. Donantes proporciona **la muestra**.
3. Compruebe la etiqueta de temperatura (Temp Label) **hasta 4 minutos** después de la recogida de muestras. Un **color verde** aparecerá para indicar la temperatura de la muestra de orina. El rango apropiado para una muestra no adulterada es **32-38 °C (90-100 °F)**.
4. Quitar la etiqueta de la taza de prueba para ver los resultados.
5. Lea las tiras de adulteración y tiras de alcohol entre **3-5 minutos** con la ayuda de la carta de color proporcionado aparte
6. El resultado de la tira de droga debe leerse a los 5 minutos. No interpretar el resultado después de **10 minutos**.

#### Pasos de uso.....!



Remover etiqueta de la copa en círculo y dirección al prepicado.

### Interpretación de Resultados: Test de Droga en Orina

Los test de inmunoensayo funcionan con líneas de color que aparecen en las zonas **C (Control)** y **T (Test)**. La lectura debe realizarse dentro del tiempo indicado en el envase (5 minutos).

#### 1. Resultado NEGATIVO (-)

Se observa una línea en **"C"** y una línea en **"T"**, aunque sea tenue.

- ✓ Detecta que la droga no está presente o está por debajo del valor de corte (cut-off).
- ✓ Una línea tenue en "T" sigue siendo NEGATIVA.

**Interpretación:** No se detecta consumo reciente significativo según los estándares del ISP.

#### 2. Resultado POSITIVO (+)

Aparece línea en **"C"**, pero NO aparece línea en **"T"**.

- X La ausencia de la línea "T" indica que la droga está igual o por encima del cut-off.
- X Debe considerarse un resultado presuntivo positivo.

**Interpretación:** La sustancia está presente en niveles relevantes para tamizaje laboral o clínico.

**Recomendación ISP:** Todo resultado positivo debe confirmarse **con una técnica de laboratorio (GC/MS o LC/MS/MS)**.

#### 3. Resultado INVÁLIDO

No aparece línea en **"C"**, independientemente de lo que ocurra en **"T"**.

- X El test no funcionó correctamente.
- X Puede deberse a volumen insuficiente de muestra, humedad, contaminación o producto dañado.

**Acción:** Repetir con un nuevo dispositivo.

### Interpretación de Resultados: Test de Alcohol en Orina

#### Interpretación de Colores

**0.00% – Amarillo claro:** Sin presencia detectable de alcohol. Condiciones seguras para conducir o trabajar.

**0.04% – Celeste suave:** Indica consumo reciente.

**0.08% – Verde aguamarina:** Sobre el límite legal de conducción. Alta restricción operativa.

**0.20% – Verde oscuro / turquesa:** Estado de embriaguez evidente. Prohibido conducir o operar maquinaria.



TABLA DE COLORES DE ALCOHOL

0%      0.04%      0.08%      0.20%

