

SKU: L11-DOA12C1

# 12 DROGAS EN ORINA

## TEST DE CASSETTE



El Test Rápido de Detección de **12 Drogas** en Orina en **Formato Cassete y Pipeta** es un **dispositivo confiable, seguro y de lectura fácil**, diseñado para evaluaciones rápidas y eficientes que **cumple con el tamizaje recomendado por el ISP de Chile**.

**Características:** Obtén resultados rápidos y confiables en solo **3 a 5 min** el **Test Cassete 12 Drogas**, su lectura es 100% visual, clara y sin necesidad de equipos adicionales, ideal para controles rápidos.

Este test se utiliza con **orina fresca**, funcionando perfectamente entre **30°C**.

Solo abre el empaque o sobre cuando **vayas a usarlo** y listo. Diseñado rapido, asegura **precisión, facilidad y eficiencia** en cada evaluación.

**Puntos de Cortes del dispositivo y comparados con el Tamizaje Recomendado del ISP de Chile.**


NOMBRE DE DROGA	Sigla	Punto de Corte Copa ng/ml	Tamizaje ISP ng/ml	Cumple Tamizaje
COCAINA	COC	150	150	✓ Cumple
MARIHUANA	THC	50	50	✓ Cumple
ANFETAMINAS	AMP	500	500	✓ Cumple
BENZODIAZEPINAS	BZO	200	200	✓ Cumple
OPIÁCEOS	OPI	2000	2000	✓ Cumple
METANFETAMINAS	MET	500	500	✓ Cumple
ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS	TCA	1000	-	-
METADONA	MTD	300	300	✓ Cumple
BARBITURICOS	BAR	200	200	✓ Cumple
KETAMINA	KET	1000	1000	✓ Cumple
FENCICLIDINA	PCP	25	25	✓ Cumple
EXTASIS	MDMA	500	500	✓ Cumple

Fuente: tamizaje de drogas de abuso en orina Version2, 2024 del ISP de Chile.

El **ISP de Chile o Instituto de Salud Publica de Chile** establece **CUT-OFF** (puntos de corte) obligatorios para considerar una prueba de tamizaje como válida.

Estos valores provienen de estándares internacionales **SAMHSA y EWDTS**.

Este test cumple 100% con todos los valores de corte oficiales del ISP de Chile.

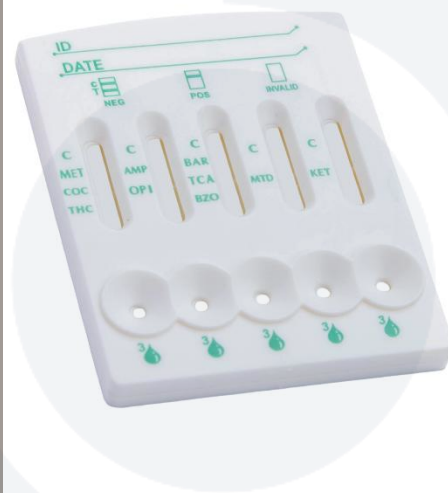

SKU: L11-DOA12C1


## TEST DE CASSETTE: 12 DROGAS EN ORINA

### Instrucciones de uso:

1. Llevar la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Sacar el test en **Cassette** de su bolsa y utilizarlo.
2. Abrir el **cassette**.
3. Coloque el cassette de prueba sobre una superficie limpia y nivelada. Sostenga el **gotero verticalmente** y **transfiera 3 gotas** de orina al pocillo de muestra (S) del casete de prueba; luego, inicie el cronómetro.
4. Leer las tiras de adulteración/controles de validez.
5. El resultado debe ser interpretado a los **5 minutos**. No interpretar el resultado pasado 10 minutos.



### Pasos de uso.....!

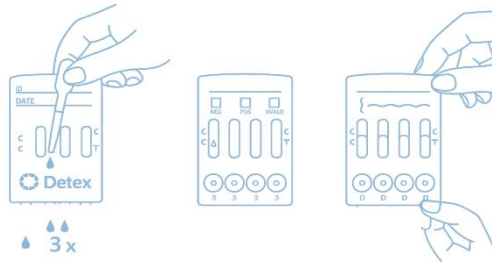

Posicionar el test cassette de forma horizontal y pipetear con 3 gotitas en cada orificio ubicado en la parte inferior del test.



### Interpretación de Resultados: Test de Droga en Orina

Los test de inmunoensayo funcionan con líneas de color que aparecen en las zonas **C (Control)** y **T (Test)**. La lectura debe realizarse dentro del tiempo indicado en el envase (5 minutos).

#### 1. Resultado NEGATIVO (-)

Se observa una línea en “**C**” y una línea en “**T**”, aunque sea tenue.

- ✓ Detecta que la droga no está presente o está por debajo del valor de corte (cut-off).
- ✓ Una línea tenue en “**T**” sigue siendo NEGATIVA.

**Interpretación:** No se detecta consumo reciente significativo según los estándares del ISP.

#### 2. Resultado POSITIVO (+)

Aparece línea en “**C**”, pero NO aparece línea en “**T**”.

- X La ausencia de la línea “**T**” indica que la droga está igual o por encima del cut-off.
- X Debe considerarse un resultado presuntivo positivo.

**Interpretación:** La sustancia está presente en niveles relevantes para tamizaje laboral o clínico.

**Recomendación ISP:** Todo resultado positivo debe confirmarse **con una técnica de laboratorio (GC/MS o LC/MS/MS)**.

#### 3. Resultado INVÁLIDO

No aparece línea en “**C**”, independientemente de lo que ocurra en “**T**”.

- X El test no funcionó correctamente.
- X Puede deberse a volumen insuficiente de muestra, humedad, contaminación o producto dañado.

**Acción:** Repetir con un nuevo dispositivo.